


Masques barrières 50 lavages (polyester 3 couches)

NORMES AFNOR SPEC S76-001



Tigil's®

Le masque qui vous protège
et vous habille

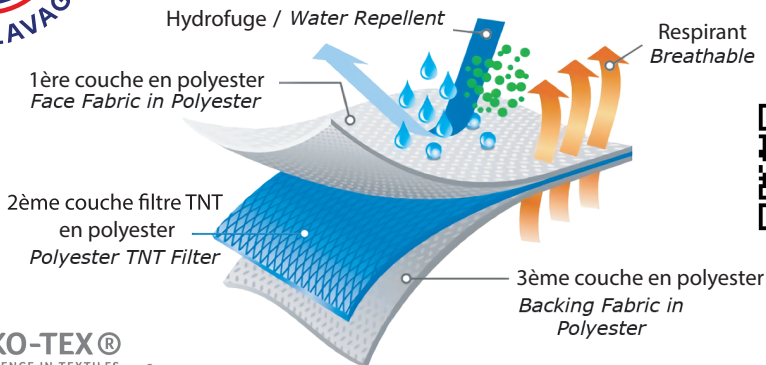

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



CE DISPOSITIF N'EST PAS UN MASQUE CHIRURGICAL (REGLEMENT UE/2017/745) NI UN MASQUE DE TYPE FFP (REGLEMENT UE/2016/425).

TYPE DE PRODUIT : « MASQUE GRAND PUBLIC DE CATEGORIE 1 SELON LA NOTE INTERMINISTERIELLE DU 29 MARS 2020 MISE A JOUR LE 26 AVRIL 2020 »

MATERIAU DONT LES PERFORMANCES ONT ETE MESUREES PAR LE LABORATOIRE EUROFINIS ATS, 505 RUE LOUIS BRETON, CS550550, 13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 (RAPPORT N)1185744F01 v1) ET QUI SUPPORTE 50 LAVAGES. LAVER AVANT PREMIERE UTILISATION.

- EFFICACITE DE FILTRATION DES PARTICULES DE 3 µM 98%
- PERMEABILITE A L'AIR POUR UNE DEPRESSION DE 100 Pa : 383 L / m² / S

AVERTISSEMENT : Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage.

Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites au verso.

MADE IN ITALY

IDEAL PROMOTION / VILLEURBANNE / FRANCE - SITE : www.briquets-cadeaux.com



NOTICE D'UTILISATION

Tigil's®

Le masque qui vous protège et vous habille

Avertissement : pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter cette notice d'utilisation

- Portez ce masque dès que vous êtes en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez
- Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez
- Attention : si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.
- Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant.
- Ce masque ne remplace pas les gestes barrières qu'il faut maintenir : lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes. Il ajoute une barrière physique.

COMMENT PORTER LE MASQUE ?

Avant de le mettre :

1. Avant de toucher le masque lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique
2. Inspectez le masque et assurez-vous qu'il n'y a pas de trous, déchirures ou dégradations
3. Ne modifiez jamais le masque de quelque façon que ce soit

Pour le mettre :

1. Tenez le masque par la/les lanière(s) élastique(s) et placez-le au niveau de votre bouche, enfin, étirez la/les lanière(s) élastique(s) derrière votre tête
2. Faites un réglage très souple de l'élastique, ne serrez pas. Le masque doit être posé, pas plaqué.
3. Positionnez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton
4. Vous pouvez insérer une barrette nasale ou de type alimentaire (attache sachet de pain de mie par exemple)

Lorsque vous le portez :

1. Évitez de le toucher et de le déplacer
2. Ne le mettez jamais en position d'attente sur le front, le menton ou autour du cou

Il faut changer le masque :

1. Lorsque vous l'avez porté 4 heures
2. Lorsque vous souhaitez boire ou manger
3. Si vous avez du mal à respirer
4. Si le masque s'humidifie
5. Si le masque est endommagé
6. Si le masque est déformé et ne tient plus correctement

Pour l'enlever :

1. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique
2. Retirez la/les élastique(s) pour décoller le masque de votre visage
3. En attendant de le laver, isolez-le dans un sac en plastique dédié ; ou, si le masque est utilisé, jetez-le dans une poubelle qui se ferme
4. Pour terminer, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique



COMMENT ENTREtenir LE MASQUE ?

Avant ouverture :

1. Conservez le masque dans un endroit sec et à l'abri des rayons du soleil
2. Conservez le masque à une température comprise entre 2°C et +55°C afin de préserver toutes ses caractéristiques

Pour le lavage :

1. Retirez la barrette nasale de type alimentaire.
2. Lavez le masque à la machine avec un peu de lessive. Choisissez un programme d'au moins 30 minutes à 60°C. Vous pouvez le mettre en machine avec votre linge.
3. Après avoir touché le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.
4. Ce masque a été testé pour 50 lavages. Après 50 lavages, la filtration du masque n'est plus garantie.
5. Lorsque la machine est terminée, avant de toucher le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique et remettez le masque en forme

Après le lavage :

1. Faites sécher le masque dans son intégralité sur un support propre, à l'air libre ou au sèche-cheveux
2. Ne repassez pas votre masque, vous risquez de faire fondre la matière (polypropylène). Si vous souhaitez le repasser, repassez-le avec un chiffon propre et humide et à basse température
3. Dès que le masque est sec, stockez-le dans un emballage propre et hermétique (sac de congélation par exemple)

DECOMPTE D'UTILISATION DES MASQUES

Le masque pouvant être lavé 5 fois, chaque masque est donc utilisable 51 fois. Pour vous aider à suivre et à gérer le décompte d'utilisation de vos masques, veuillez renseigner le tableau suivant en cochant les cases

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Masque 1																										
Masque 1	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51